

signia

# Pure Charge&Go X

Guide à l'attention des audioprothésistes



Made for

iPhone | iPad | iPod

# Sommaire

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Avant et après l'appareillage</b>	<b>3</b>
Assemblage	3
Activation	4
Charge	4
Connexion	4
À propos du numéro de série	5
<b>Remplacement du boîtier</b>	<b>6</b>
Démontage	6
Assemblage	7
<b>Informations importantes sur la sécurité</b>	<b>8</b>
Avertissements généraux	8
Batteries défectueuses	9
<b>Autres informations</b>	<b>10</b>
Périodes de stockage	10
Symboles utilisés dans ce document	10

# Introduction

Ce guide s'adresse aux audioprothésistes. Il fournit des informations importantes sur les aides auditives équipées de batteries (batteries lithium-ion) intégrées de façon permanente.



## ATTENTION

Il est important de lire l'intégralité de ce guide, du guide d'utilisation et du manuel de sécurité. Suivez les informations de sécurité pour éviter des dommages ou des blessures.

## Avant et après l'appareillage

Avant de commencer l'appareillage, vous devez préparer les appareils auditifs.

### Assemblage

- ▶ Chaque appareil auditif est livré avec une batterie préinstallée. Il n'est donc pas nécessaire d'y insérer de pile.
- ▶ Fixez un embout à l'écouteur correspondant.
- ▶ Clipsez l'écouteur sur l'appareil auditif.
- ▶ Enfoncez la barre de verrouillage de l'écouteur dans le boîtier.



## Activation

Avant la première utilisation ou le premier appareillage, vous devez activer les appareils auditifs en les plaçant dans le chargeur. Attendez que le premier voyant orange s'allume.

Remarque :

- Les appareils auditifs qui sont activés, mais **inutilisés**, peuvent se décharger plus vite que des appareils auditifs qui n'ont **pas** été activés. Par conséquent, veillez à n'activer les appareils auditifs qu'en prévision d'une première utilisation ou d'un premier appareillage.

## Charge

Les appareils auditifs sont préchargés à la livraison. Ils devraient avoir suffisamment de puissance pour la réalisation du premier appareillage.

Nous recommandons d'effectuer une charge complète des appareils auditifs avant le premier appareillage et la remise au client. Un cycle de charge complet dure environ 4 heures.

Conformez-vous aux conditions d'utilisation décrites dans les guides d'utilisation de l'appareil auditif et du chargeur.

## Connexion

Utilisez Noahlink Wireless pour procéder à la programmation sans fil des appareils auditifs.


## À propos du numéro de série

Le numéro de série et le niveau de performance sont imprimés sur le boîtier.

Vous pouvez vérifier le numéro de série sur le boîtier, notamment lorsque vous contactez nos services pour obtenir une assistance :

- Glissez l'ongle sous le rocker-switch pour le désenclencher et découvrir le numéro de série.

Remarque : Si vous appuyez sur la partie inférieure du rocker-switch pendant plus de 3 secondes, l'appareil auditif risque de s'allumer. Après avoir remis le rocker-switch en place, vous pouvez éteindre l'appareil auditif en exerçant une pression longue sur la partie supérieure du rocker-switch.

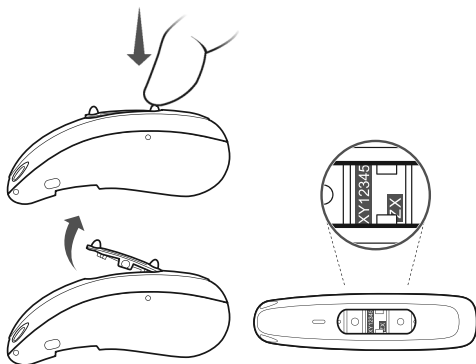

# Remplacement du boîtier




## REMARQUE


- ▶ Cette tâche de maintenance doit être effectuée par l'audioprothésiste.

## Démontage


- ▶ Retirez l'écouteur et les axes.

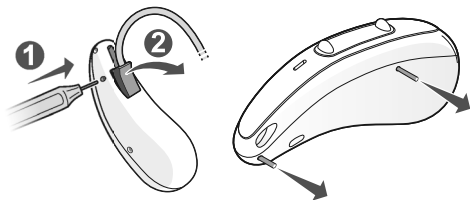

- ▶ Insérez l'outil fourni à l'extrémité de l'appareil auditif, sous la face avant, et détachez le boîtier supérieur.

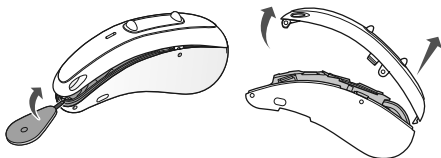


- ▶ Retirez le boîtier inférieur en le tirant. Aucun outil n'est requis.

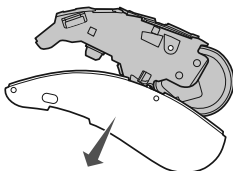


## Assemblage


- Installez le boîtier inférieur.

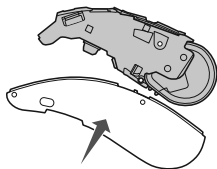

- Installez le boîtier supérieur en engageant d'abord la partie avant.

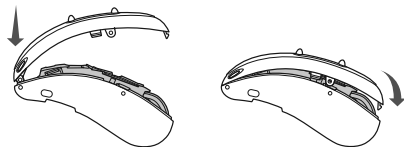

- Fixez les axes. Respectez bien les différentes longueurs et les différents diamètres des axes.

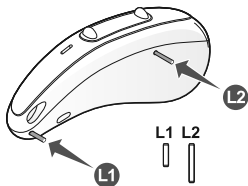

- Fixez l'écouteur.



# Informations importantes sur la sécurité

Ce paragraphe contient des consignes de sécurité importantes qui concernent la batterie. Pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, consultez le manuel de sécurité et le guide d'utilisation fournis avec les appareils auditifs.



## REMARQUE

- ▶ Vous ne devez en aucun cas remplacer les batteries. Cette opération relève exclusivement de la compétence d'un centre d'entretien agréé.

## Avertissements généraux



## AVERTISSEMENT

L'appareil auditif intègre dès sa sortie d'usine une batterie (batterie rechargeable lithium-ion). Une utilisation incorrecte de la batterie ou de l'appareil auditif peut causer l'explosion de la batterie.

Risque de blessure, d'incendie ou d'explosion !

- ▶ Suivez les consignes de sécurité concernant les batteries qui sont indiquées dans ce paragraphe.



## Batteries défectueuses

Procédez comme suit si vous pensez que la batterie est défectueuse :

- ▶ Placez les appareils auditifs dans le chargeur.  
Si un voyant s'allume en rouge, alors la batterie est effectivement défectueuse.
- ▶ Procédez à un examen visuel de l'appareil auditif.  
Le test est considéré comme non concluant si vous constatez au moins une des conditions ci-dessous :
  - Il y a des signes physiques de déformation, provoquée par le gonflement de la batterie au lithium à l'intérieur de l'appareil auditif.
  - Il y a des traces visibles de fuite émanant de la batterie au lithium.
  - Le produit génère de la chaleur, ou bien est chaud au toucher.

Si une seule de ces étapes d'essai révèle une anomalie, vous pouvez considérer que la batterie est défectueuse. Pour des raisons de sécurité, il n'est plus possible d'expédier les appareils auditifs. Veuillez donc noter le numéro de série de l'appareil auditif, prendre une photo des dommages constatés, puis consulter le service client Sivantos avant de mettre votre produit au rebut, en respectant la réglementation locale.

# Autres informations

## Périodes de stockage

La durée de conservation d'un appareil auditif qui n'a pas été activé est de 3 mois.

Une fois activée, la batterie doit être chargée au moins tous les 6 mois pour rester en bon état. Par prudence, nous vous recommandons de charger les appareils auditifs au moins tous les 3 mois.

## Symboles utilisés dans ce document



Indique une situation pouvant entraîner des blessures graves, modérées ou mineures.



Indique un risque de dommage matériel.



Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre appareil.

---

Made for

iPhone | iPad | iPod

« Made for iPhone »,

« Made for iPad » et « Made for iPod » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécialement pour être connecté à un iPhone, un iPad, ou un iPod, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone, un iPad ou un iPod peut altérer les performances sans fil.



Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

 **Fabricant légal**

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Allemagne  
Tél. +49 9131 308 0  
[www.signia-audition.fr](http://www.signia-audition.fr)  
[www.signia-hearing.can](http://www.signia-hearing.can)  
[www.signia-hearing.ch](http://www.signia-hearing.ch)



Document No. 03998-99T01-7700 FR  
Order/Item No. 109 693 26  
Master Rev01, 09.2019  
© 10.2019, Signia GmbH. All rights reserved



0123

**[www.signia-hearing.com](http://www.signia-hearing.com)**